

Service rapport / Servicebericht / Service Report

Kunde / Kunde / Customer	Salgsordrenr. / Kundenauftragsnr. / Sales Order no.	Serienr. / Serienr / Serial no.
Tekniker / Techniker / Technician	Inspektionsdato / Inspektionsdatum / Inspection date	Næste inspektionsdato / Nächstes Inspektionsdatum / Next Inspection date

Løftevogn OK / Lift OK / Lift OK

Løftevogn må ikke benyttes / Lift darf nicht benutzt werden / Lift must not be used

Gennemførte funktionstest / Funktionstest durchgeführt / Functional test conducted					Evaluering / Auswertung / Evaluation		Bemærkning / Bemerkung / Notes			
Klistermærker og skilte sidder godt fast og er læsbare / Notwendigen Etiketten und Schilder wurden befestigt und sind lesbar / Stickers and signs are firmly attached and readable					OK	Not OK				
Funktion af lader og dennes LED-diode / Ladegerät und die LED-Anzeigen funktionieren Ordnungsgemäß / Function of the charging unit and LED lights					OK	Not OK				
Lastekapacitet testet med max last i henhold til skilt / Lastkapazität geprüft mit max. laut Aufkleber / Load capacity test with max. load according to sticker				kg	OK	Not OK				
Løfthastighed 1m/ 8-10sek / Geschwindigkeit 1m/8-10 Sek. des Mobillift überprüft / Lifting speed 1m/8-10 sec.					OK	Not OK				
Elektronisk overbelastning / Die Funktion der Überlastungssicherung wurde geprüft und bestätigt / Electronic overload					OK	Not OK				
Topstop kontakt / Die Funktion der Oberen Anschlag geprüft / Top limit switch					OK	Not OK				
Bremsefunktion og evt. retningsbremse på centralbremsehjul / Die Funktion der Bremse eventuell Feststellbremse / Brake function and directional lock on central brake wheel					OK	Not OK				
Funktion af værktøj / Die Funktion des Werkzeuges / Function of tool					OK	Not OK				
Batteri Spænding * / Akkus Spannung * / Battery voltage *				V DC	V DC	V DC	V DC	OK	Not OK	
Batteri kapacitet * / Akkus Kapazität * / Battery capacity *				%	%	%	%	OK	Not OK	
Ledningsevne værdi / Leitfähigkeit Wert / Conductance value = 320 Siemens (S)					OK	Not OK				

Document ID	Revision No.	Issue date	Approved by Owner	Approved by Quality	Page
T-02-002	000	02.04.2019	AMB	AMB	1 of 4

Gennemførte test af dele / Prüfung von Teilen abgeschlossen / Parts test conducted	Evaluering / Auswertung / Evaluation		Bemærkning / Bemerkungen / Notes	Udskiftede dele / Teile ersetzt/ Parts replaced	
	OK	Not OK		Antal / Anzahl / Quantity	Item no.
Tandrem ** / Zahnriemen** / Cam belt **	OK	Not OK	Målt HZ / Hz gemessen / Measured HZ:		
Motor / Motor / Motor	OK	Not OK			
Remhjul / Zahnrad / Belt wheel	OK	Not OK			
Friløbsleje *** / Freilauflager*** / One way bearing ***	OK	Not OK			
Motoraksel / Welle / Drive shaft	OK	Not OK			
Tophjul / Drehrad oben / Top belt wheel	OK	Not OK			
Slæde og føring / Schlitten und Führung / Sledge alignment	OK	Not OK			
Baghjul / Hinteräder / Rear wheels	OK	Not OK			
Forhjul / Vorderräder / Front whe	OK	Not OK			
Topstop kontakt / Top-Stop-Kontakt/ Top limit switch	OK	Not OK			
Fjernbetjening / Handbedienung / Remote control	OK	Not OK			
Mast og bensammenslutning / Mast- und Beinbefestigung / Mast and leg fixation	OK	Not OK			
Glideklodser / Gleitbuchsen / Sliding blocks	OK	Not OK			
Håndtag / Schiebebügel / Pushing handle	OK	Not OK			
Dækplade / Schirmung / Cover	OK	Not OK			

Document ID	Revision No.	Issue date	Approved by Owner	Approved by Quality	Page
T-02-002	000	02.04.2019	AMB	AMB	2 of 4

Gennemførte test af dele / Prüfung von Teilen abgeschlossen / Parts test conducted	Evaluering / Auswertung / Evaluation		Bemærkning / Bemerkung / Notes	Udskiftede dele / Teile ersetzt / Parts replaced	
				Antal / Anzahl / Quantity	Item no.
Sikringer / Sicherungen / Fuses	OK	Not OK			
Batteri 2-4 stk / Akkus 2-4 Stück/ Batteries 2-4 pcs	OK	Not OK			
Lader / Ladegeråd / Charger	OK	Not OK			
LED diode / LED-Diode/ LED diodes	OK	Not OK			
Kabelføring / Kabelführung / Cable guide	OK	Not OK			
Lade kabel / Ladekabel / Charging cable	OK	Not OK			
Værktøj / Werkzeug / Tool parts	OK	Not OK			
Test skilt / Prüfplakette / Test sticker	OK	Not OK			
Andre dele / Andere Teile / Other parts	OK	Not OK			

Document ID	Revision No.	Issue date	Approved by Owner	Approved by Quality	Page
T-02-002	000	02.04.2019	AMB	AMB	3 of 4

Vigtige komponenter / Wichtige Komponenten / Critical components:

* Hvis et eller flere batterier er under 70% iht ledningsevnenes referencepunkt 320, skal alle batterier skiftes
 * Falls 1 oder mehrere Akkus unter 70% Leitfähigkeitwert 320 liegen, müssen alle Akkus ausgewechselt werden
 * If one or more batteries are below 70% capacity according to the conductance value of 320, all batteries must be changed

**** Tandrem udskiftes når/hvis noget af følgende opstår:**
Ethvert tegn på slitage, synlige revner eller misfarvning.
Udskiftes efter 8 år ved normal brug (gennemsnitligt <20 løft om dagen pr. år).
Udskiftes efter 4 år ved intensivbrug (gennemsnitligt >20 løft om dagen pr. år).
 ** Zahnriemen muß in folgenden Fällen ersetzt werden:
 Anzeichen von Verschleiß, sichtbare Risse oder Verfärbungen
 Nach 8 Jahren bei normaler Verwendung (durchschnittlich < 20 Hebevorgänge am Tag über den Zeitraum eines Jahres)
 Nach 4 Jahren bei intensiver Verwendung (durchschnittlich > 20 Hebevorgänge am Tag über den Zeitraum eines Jahres)
 ** Cam belt replace when/if any of the below points occur:
 Any sign of wear, visual cracks, or miscolour.
 Under normal use (Use<20 lifts per day, in average over a year), replace after 8 years.
 Under intensive use (Use>20 lifts per day, in average over a year), replace after 4 years.

Tandremstramning / Zahnriemen Anziehen / Belt tension	S [Hz]	L [Hz]	M [Hz]	H [Hz]
Impact 70	33	29	22	N/A
Impact 80	N/A	28	22	N/A
Impact 90 / Impact 130 / Inox 90	N/A	30	25	19
Impact 200 / Inox 200	N/A	33	30	21
E300R	N/A	N/A	30	22

***** Friløbsleje udskiftes når/hvis noget af følgende opstår:**
Ethvert tegn på slitage, usædvanlige lyde eller synlige defekter.
Udskiftes efter 8 år ved normalbrug (gennemsnitligt <20 løft om dagen pr. år).
Udskiftes efter 4 år ved intensivbrug (gennemsnitligt >20 løft om dagen pr. år).
 *** Freilauflager muß in folgenden Fällen ersetzt werden:
 Anzeichen von Verschleiß, ungewöhnliche Geräusche oder sichtbare Mängel
 Nach 8 Jahren bei normaler Verwendung (durchschnittlich < 20 Hebevorgänge am Tag über den Zeitraum eines Jahres)
 Nach 4 Jahren bei intensiver Verwendung (durchschnittlich > 20 Hebevorgänge am Tag über den Zeitraum eines Jahres)
 *** Oneway bearing replace when/if any of the below point occur:
 Any sign of wear, unusual sounds or visual defects.
 Under normal use (Use<20 lifts per day in average over a year), replace after 8 years.
 Under intensive use (Use>20 lifts per day, in average over a year), replace after 4 years.

Document ID	Revision No.	Issue date	Approved by Owner	Approved by Quality	Page
T-02-002	000	02.04.2019	AMB	AMB	4 of 4